

Micropipette per la raccolta ed il trasferimento di sangue

Istruzioni d'Uso


DESCRIZIONE



PRIMA DI INIZIARE

Disinfettare il polpastrello e aspettare che sia completamente asciutto prima di pungere il dito. Pungere il dito per ottenere una goccia di sangue adeguata (vedi immagine 1)

RIEMPIMENTO

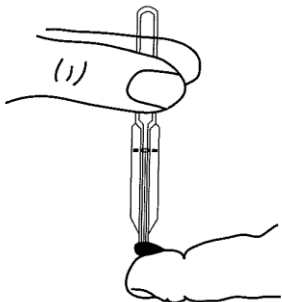

NON schiacciare il bulbo per riempire la micropipetta . La micropipetta si riempie automaticamente per capillarità

1. Avvicinare la micropipetta perpendicolarmente alla goccia di sangue (vedere immagine 1) e toccare con la punta della micropipetta la goccia di sangue per

Immagine 1

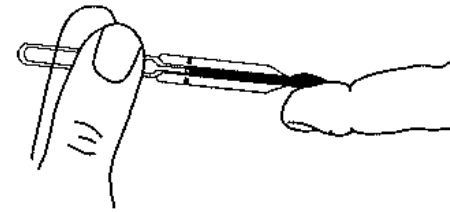


Immagine 2

- rompere la tensione superficiale.
 2. Ruotare la micropipetta orizzontalmente (vedi immagine 2) e fare in modo che la micropipetta si riempia. La micropipetta si riempirà automaticamente alla linea di riempimento. Mantenere la micropipetta in posizione fin tanto che il sangue abbia raggiunto la linea di riempimento.
- Nota: Se la micropipetta non si è riempita fino alla linea di riempimento, non sarà possibile dispensare il sangue

TRASFERIMENTO

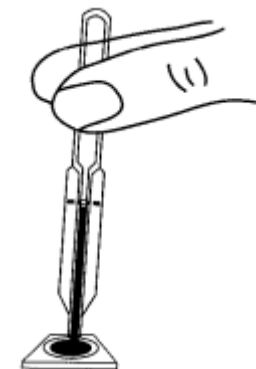


Immagine 3

Per trasferire il sangue nel pozzetto :

4. Avvicinare la micropipetta al pozzetto per il campione e premere il bulbo in modo deciso per trasferire l'intero contenuto della micropipetta (vedere immagine 3).
- Nota : Se il sangue non esce dalla micropipetta, il campione non è sufficiente, continuare a riempire la micropipetta come al punto 2.